



Abbott



SERIE SD BIOLINE MALARIA Ag RDT

Pruebas de diagnóstico rápido y preciso de la malaria para un manejo eficaz de los casos de esta enfermedad

Cartera de SD BIOLINE RDT de Malaria para la detección de antígenos de malaria

SD BIOLINE Malaria Ag P.f

- N.º de cat.: 05FK50, 05FK51, 05FK52, 05FK53
- Detección de: *P. falciparum*-HRP2
- Diagnóstico específico y preciso de *P. falciparum*
- Precalificados por la OMS

RESULTADOS

DETECCIÓN DE	SENSIBILIDAD	ESPECIFICIDAD
<i>P.f</i> (HRP2)	99.7 %	99.5 %



SD BIOLINE Malaria Ag P.f (HRP2/pLDH)

- N.º de cat.: 05FK90, 05FK91, 05FK92, 05FK93
- Detección de: *P.f*-HRP2 y *P.f*-pLDH
- Reducción de índices de falsos positivos después del tratamiento
- Útil en regiones donde se sospecha la supresión del gen *P.f*HRP2
- Precalificados por la OMS

RESULTADOS

DETECCIÓN DE	SENSIBILIDAD	ESPECIFICIDAD
<i>P.f</i> (HRP2)	99.7 %	99.3 %
<i>P.f</i> (pLDH)	97.4 %	99.7 %



SD BIOLINE Malaria Ag P.f/P.v

- N.º de cat.: 05FK80, 05FK81, 05FK82, 05FK83, 05FK86, 05FK87
- Detección de: *P.f*-HRP2 y *P.v*-pLDH
- Detección diferencial de *P.f* y *P.v*
- Útil en regiones donde *P.v* y *P.f* son dominantes
- Diferenciar la mono infección por *P.f* de la coinfección por *P.f*/*P.v*
- Precalificados por la OMS

RESULTADOS

DETECCIÓN DE	SENSIBILIDAD	ESPECIFICIDAD
<i>P.f</i> (HRP2)	99.7 %	99.5 %
<i>P.v</i> (pLDH)	95.5 %	99.5 %



SD BIOLINE Malaria Ag P.f/P.f/P.v

- N.º de cat.: 05FK120, 05FK123
- Detección de: *P.f*-HRP2, *P.f*-pLDH y *P.v*-pLDH
- Detección diferencial de *P.f* y *P.v*
- Útil en regiones donde *P.v* y *P.f* son dominantes
- Útil en regiones donde se sospecha la supresión del gen *P.f*HRP2
- Diferenciar la mono infección por *P.f* de la coinfección por *P.f*/*P.v*
- Precalificados por la OMS

RESULTADOS

DETECCIÓN DE	SENSIBILIDAD	ESPECIFICIDAD
<i>P.f</i> (HRP2)	99.7 %	99.3 %
<i>P.f</i> (pLDH)	97.4 %	99.3 %
<i>P.v</i> (pLDH)	95.5 %	99.3 %



SD BIOLINE Malaria Ag P.f/Pan

- N.º de cat.: 05FK60, 05FK61, 05FK62, 05FK63, 05FK67
- Detección de: *P.f*-HRP2 y Pan-pLDH
- Distinguir la infección por *P.f* de otras especies (*P.v*, *P.m* o *P.o*)
- Útil en regiones donde todas las especies de malaria están circulando
- Precalificados por la OMS

RESULTADOS

DETECCIÓN DE	SENSIBILIDAD	ESPECIFICIDAD
<i>P.f</i> (HRP2)	99.7 %	99.5 %
Pan (pLDH)	95.5 %	99.5 %



Serie SD BIOLINE Malaria Ag RDT

FÁCIL DE USAR

1 Añadir muestra
Dispense **5µl de sangre entera** en el recipiente para muestras circular.

2 Añadir diluyente de ensayo
Dispense **4 gotas** de diluyente de ensayo en el recipiente cuadrado para diluyente de ensayo.

3 Esperar 15 min
Observe los resultados de la prueba en **15 minutos**.

Precaución: No lea la prueba pasados 30 minutos. Si se lee fuera de este plazo, los resultados pueden ser falsos.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

PRODUCTO	N.º DE CAT.	DESCRIPCIÓN	MUESTRA	TIPO	KIT DE PRUEBA
SD BIOLINE Malaria Ag P.f Prueba de Malaria P.f Ag (HRP2 para P.f)	05FK50	Muestra estándar + Lanceta estéril	Sangre entera	Dispositivo	25P
	05FK51	Muestra estándar + Lanceta de seguridad	Sangre entera	Dispositivo	25P
	05FK52	Embalaje individual de 1 prueba + Lanceta de seguridad	Sangre entera	Dispositivo	1P x 25
	05FK53	Embalaje individual de 1 prueba + Lanceta estéril	Sangre entera	Dispositivo	1P x 25
SD BIOLINE Malaria Ag Pf/Pan Prueba para la detección diferencial de antígenos de especies de Pan Plasmodium (HRP2 para P.f. y pLDH para Pan)	05FK60	Muestra estándar + Lanceta estéril	Sangre entera	Dispositivo	25P
	05FK61	Muestra estándar + Lanceta de seguridad	Sangre entera	Dispositivo	25P
	05FK62	Embalaje individual de 1 prueba + Lanceta de seguridad	Sangre entera	Dispositivo	1P x 25
	05FK63	Embalaje individual de 1 prueba + Lanceta estéril	Sangre entera	Dispositivo	1P x 25
SD BIOLINE Malaria Ag P.f/P.v Prueba para la detección diferencial de P.f/P.v Ag (HRP2 para P.f y pLDH para P.v)	05FK67	Muestra de 30P, incluye buffer individual, hisopo seco, guante de látex + Lanceta estéril	Sangre entera	Dispositivo	30P
	05FK80	Muestra estándar + Lanceta estéril	Sangre entera	Dispositivo	25P
	05FK81	Muestra estándar + Lanceta de seguridad	Sangre entera	Dispositivo	25P
	05FK82	Embalaje individual de 1 prueba + Lanceta de seguridad	Sangre entera	Dispositivo	1P x 25
	05FK83	Embalaje individual de 1 prueba + Lanceta estéril	Sangre entera	Dispositivo	1P x 25
SD BIOLINE Malaria Ag P.f (HRP2/pLDH) Prueba para la detección de Malaria P.f Ag (HRP2 para P.f y pLDH para P.f)	05FK86	Muestra de 10P + Lanceta estéril	Sangre entera	Dispositivo	10P
	05FK87	Muestra de 25P (8P x 2kits + 9P x 1kit) + Lanceta estéril	Sangre entera	Dispositivo	25P (8P/8P/9P)
	05FK90	Muestra estándar + Lanceta estéril	Sangre entera	Dispositivo	25P
	05FK91	Muestra estándar + Lanceta de seguridad	Sangre entera	Dispositivo	25P
SD BIOLINE Malaria Ag P.f/P.f/P.v Prueba para la detección de Malaria P.f Ag (HRP2 para P.f, pLDH para P.f, y pLDH para P.v)	05FK92	Embalaje individual de 1 prueba + Lanceta de seguridad	Sangre entera	Dispositivo	1P x 25
	05FK93	Embalaje individual de 1 prueba + Lanceta estéril	Sangre entera	Dispositivo	1P x 25
	05FK120	Muestra estándar + Lanceta estéril	Sangre entera	Dispositivo	25P
	05FK123	Embalaje individual de 1 prueba + Lanceta estéril	Sangre entera	Dispositivo	1P x 25

ABBOTT.COM/POCT

1. La sensibilidad y la especificidad se extraen de las instrucciones de uso de cada producto.

© 2019 Abbott. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales mencionadas son marcas comerciales del grupo de empresas Abbott o de sus respectivos propietarios. Las fotos que se muestran son sólo para fines ilustrativos. Las personas representadas en estas fotos son modelos. 120002680-04, 06/19

